

DESCRIPTIF PRODUIT


Masque textile lavable et réutilisable

65% Polyester 35% Coton

1 épaisseur

150Gr/M² ou 210Gr/m²

Lavage de 60° à 90°

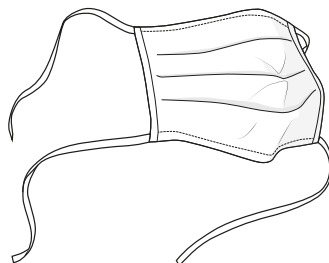

ENTRETIEN



- > Lavage en machine de 60° à 90°
- > Ne pas chlorer
- > Séchage en tambour à température basse
- > Repassage possible à température basse
- > Nettoyage à sec autorisé
- > Résistant de 30 à 50 lavages

CONSEILS D'UTILISATION

Ces masques sont une première barrière, si ils sont combinés à l'ensemble des gestes barrières.



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades

Ce type de masque lavable est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement les notices d'utilisation de ce masque :

- **Avant la première utilisation**, effectuer un premier lavage.
- Avant de toucher les masques propres se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes et bien les sécher avec une serviette propre ou à l'air libre
- Mettre le masque **en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage.**
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- **Après usage**, mettre les masques souillés dans une boîte hermétique ou sachet et fermer jusqu'au lavage.
- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.
- Laver en machine de 60° à 90 degrés avec du détergent classique.
- Faire bien sécher les masques à l'air libre ou au sèche-linge.
- Les stocker hermétiquement.